

2018年3月作成（第1版）

医療機器製造販売届出番号：27B2X0032800001

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000

クイックバッグ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、バッグ、ジッパーによる開口部、ポートからなる。

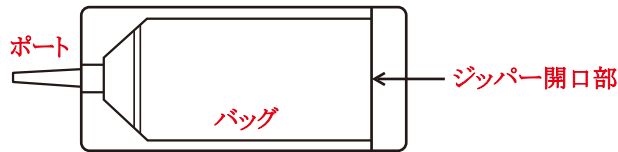

【使用目的又は効果】

経腸栄養ラインを通じた内服液剤投与など、注射以外の液剤投与に使用される器具である。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出す。
2. ジッパーを開きバッグ内に薬剤及び温湯等を投入する。
3. ジッパーを完全に閉じ、カテーテル等と確実に接続する。
4. バッグ上部を折りたたみ、ポートとチューブが真っ直ぐな状態で接続部を、必ず持ち加圧して注入する。

【使用上の注意】

- 1) 使用中は、本品の破損、接続部との緩み、液漏れ等に十分注意すること。
- 2) ポートの付け根が曲がった状態で加圧しないこと。
(横のシールより破損して液漏れの可能性がある。)
- 3) 高温（70℃以上）の温湯は、入れないこと。
(火傷の恐れがある。)
- 4) 本品を先のとがった物で傷つけないこと。
(破損が生じ、液漏れ等を引き起こす可能性がある。)
- 5) 充填したバッグの長時間放置や電子レンジで加熱をしないこと。
- 6) 本品に衝撃を与えないこと（破損するおそれがある。)
- 7) ジッパーが完全に閉じていることを確認すること。
(不完全な閉まり方をしている場合液漏れの可能性がある。)
- 8) バッグ内の固形物が溶解している事を確認すること。
(チューブが詰まるおそれがあるので注意すること。)
- 9) 温湯等は、入れすぎないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

〈有効期間〉5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 QIB

住 所：大阪府大東市諸福5丁目4番12号

電話番号：072-871-4518